


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cânula descartável

Revisão 01

| | |
|--------------------------------|---|
| Descrição: | Cânula Descartável Eyeclean |
| Apresentação: | Embalada individualmente em envelope grau cirúrgico |
| Registro Anvisa: | 81765480010 |
| Classificação de Risco: | II – Médio Risco |
| Vencimento do Registro: | Vigente |

| Modelo | Dimensões | Diferenças |
|----------------------|--|-------------------------|
| 23G 25 x 0,6mm curva | 25mm de comprimento x 0,60mm de diâmetro, ponta curvada em 38º | Dimensional e curvatura |
| 23G 25 x 0,6mm reta | 25mm de comprimento x 0,60mm de diâmetro | Dimensional |
| 23G 30 x 0,6mm curva | 30mm de comprimento x 0,60mm de diâmetro, ponta curvada em 38º | Dimensional e curvatura |
| 23G 30 x 0,6mm reta | 30mm de comprimento x 0,60mm de diâmetro | Dimensional |
| 22G 25 x 0,7mm curva | 25mm de comprimento x 0,70mm de diâmetro, ponta curvada em 38º | Dimensional e curvatura |
| 22G 25 x 0,7mm reta | 25mm de comprimento x 0,70mm de diâmetro | Dimensional |
| 22G 30 x 0,7mm curva | 30mm de comprimento x 0,70mm de diâmetro, ponta curvada em 38º | Dimensional e curvatura |
| 22G 30 x 0,7mm reta | 30mm de comprimento x 0,70mm de diâmetro | Dimensional |
| 21G 25 x 0,8mm curva | 25mm de comprimento x 0,80mm de diâmetro, ponta curvada em 38º | Dimensional e curvatura |
| 21G 25 x 0,8mm reta | 25mm de comprimento x 0,80mm de diâmetro | Dimensional |
| 21G 30 x 0,8mm curva | 30mm de comprimento x 0,80mm de diâmetro, ponta curvada em 38º | Dimensional e curvatura |
| 21G 30 x 0,8mm reta | 30mm de comprimento x 0,80mm de diâmetro | Dimensional |

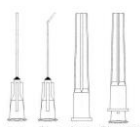

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cânula descartável

Revisão 01

| Teste | Especificação | Referência |
|---|--|---|
| Composição | ✓ Tubo: Aço inoxidável ✓ Canhão: Plástico ✓ Cola: Adesivo epóxi ✓ Capa: Polipropileno | Interna |
| Residual de Óxido de Etileno | < 25 ppm | Portaria Interministerial N°482 de 1999 |
| Etileno Cloridrina | < 25 ppm | Portaria Interministerial N°482 de 1999 |
| Etileno Glicol | < 250 ppm | Portaria Interministerial N°482 de 1999 |
| Indicador Biológico | Negativo | Portaria Interministerial N°482 de 1999 |
| Indicador Biológico (Controle positivo) | Positivo | Portaria Interministerial N°482 de 1999 |
| Integrador Químico | Aceito | Portaria Interministerial N°482 de 1999 |
| Esterilidade do Produto | Estéril | Farmacopeia Brasileira 6ª edição |

INSTRUÇÕES DE USO**Apresentação**


CÂNULA DESCARTÁVEL EYECLEAN possui canhão com conicidade universal, sendo possível conectar em todas as seringas com bico luer slip ou luer lock. Não apresenta bisel (ponta perfurante), trazendo maior segurança aos procedimentos, pois não causa perfurações.

Descrição

CÂNULA DESCARTÁVEL EYECLEAN é embalado individualmente em envelope grau cirúrgico selado termicamente ou em blister de policloreto de vinila (PVC) selado termicamente com papel grau cirúrgico, estéril. Sua embalagem secundária é um cartucho de papel cartão contendo 01, 05, 10, 25, 50 ou 100 unidades.

Modelo

- 23G 25 x 0,6mm curva; 23G 25 x 0,6mm reta;
- 23G 30 x 0,6mm curva; 23G 30 x 0,6mm reta;
- 22G 25 x 0,7mm curva; 22G 25 x 0,7mm reta;
- 22G 30 x 0,7mm curva; 22G 30 x 0,7mm reta;
- 21G 25 x 0,8mm curva; 21G 25 x 0,8mm reta;
- 21G 30 x 0,8mm curva; 21G 30 x 0,8mm reta.

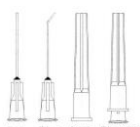

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cânula descartável

Revisão 01

Composição

Tubo: Aço inoxidável grau médico.

Canhão: Plástico.

Cola: Adesivo epoxi.

Capa protetora: Polipropileno.

Indicações

A **CÂNULA DESCARTÁVEL EYECLEAN** é indicada exclusivamente para auxiliar na irrigação em geral através de seringa descartável, não é possível utilizar para realizar perfuração, pois não possui bisel (ponta perfurante), sua ponta é reta.

Instruções de uso

1. Remover a embalagem interna da embalagem externa.
2. Abrir a embalagem com cuidado para evitar a contaminação do produto e transferir ao campo estéril, observando a técnica de transferência asséptica recomendada para este tipo de produto.
3. Conectar ou rosquear a cânula na ponta da seringa.
4. Remova a capa protetora da cânula.
5. Pressione a haste da seringa para iniciar a irrigação do produto através da cânula.
6. Descarte após o uso.

Contra indicações

Não utilizar esse produto para realizar perfurações.


Advertência:

O produto é destinado aos profissionais da área médico hospitalar, devidamente especializados e formalizados com as técnicas e procedimentos que envolvem o seu uso.

O produto somente deve ser utilizado para irrigação, pois não possui bisel (ponta perfurante).

Precauções

- ✓ Fabricante recomenda uso único.
- ✓ Não utilizar o produto após o vencimento de seu prazo de validade.
- ✓ Não usar o produto cuja embalagem apresentar sinais de deterioração ou violação, pois nestes casos a esterilidade não é garantida.
- ✓ Antes de iniciar a irrigação certifique-se que a cânula está perfeitamente travada na seringa.

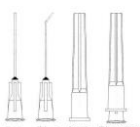

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cânula descartável

Revisão 01

- ✓ As precauções limitam-se às que normalmente estão associadas ao procedimento que está para ser.

Observação: A Eyeclean não assume qualquer responsabilidade por complicações que possam surgir como resultado da reutilização ou uso impróprio do produto.

Estéril – Esterilizado por Óxido de Etileno

Conservar o produto em temperatura ambiente.

Manter em local ventilado e sem incidência direta de luz solar ou umidade excessiva.

Armazenar em local fresco, seco e limpo, distante de vapores orgânicos e ao abrigo da luz solar.

Lote, fabricação e validade vide embalagem.

Histórico:

| Revisão | Motivo | Emissão | Implantação | Revisão |
|------------|------------------------|------------|-------------|---------|
| Revisão 00 | Emissão inicial | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 08/2023 |
| Revisão 01 | Correções ortográficas | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 08/2025 |

