

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Oclutor Ocular Estéril

Revisão 01

Descrição:	Oclutor Ocular Estéril Eyeclean
Apresentação:	Embalado individualmente em envelope grau cirúrgico
Registro Anvisa:	81765480001
Classificação de Risco:	I – Baixo Risco
Vencimento do Registro:	Vigente

Modelo	Imagem	Finalidade
Único		Proteção ocular

Teste	Especificação	Referência
Composição	Acrílico	Interna
Comprimento	70 – 110 mm	Interno
Largura	50 – 90 mm	Interno
Residual de Óxido de Etileno	< 25 ppm	Portaria Interministerial N°482 de 1999
Etileno Cloridrina	< 25 ppm	Portaria Interministerial N°482 de 1999
Etileno Glicol	< 250 ppm	Portaria Interministerial N°482 de 1999
Indicador Biológico	Negativo	Portaria Interministerial N°482 de 1999
Indicador Biológico (Controle positivo)	Positivo	Portaria Interministerial N°482 de 1999
Integrador Químico	Aceito	Portaria Interministerial N°482 de 1999
Esterilidade do Produto	Estéril	Farmacopeia Brasileira 6ª edição



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Oclusor Ocular Estéril

Revisão 01

INSTRUÇÕES DE USO**Apresentação**

OCLUSOR OCULAR ESTÉRIL EYECLEAN é embalado individualmente em envelope grau cirúrgico termicamente lacrado e estéril. Sua embalagem secundária é um cartucho de papel cartão.

Composição

Acrílico 100%.

Indicações

O **OCLUSOR OCULAR ESTÉRIL EYECLEAN** foi projetado especificamente para a proteção do olho operado no pós-cirúrgico.

Instruções de uso

- ✓ Remover a embalagem interna da embalagem externa.
- ✓ Abrir a embalagem com cuidado para evitar a contaminação do produto e transferir ao campo estéril, observando a técnica de transferência asséptica recomendada para este tipo de produto.
- ✓ Para melhor adesão, limpe e seque previamente a pele ao redor do olho.
- ✓ O paciente deverá fechar os olhos mantendo os músculos faciais relaxados, a fim de evitar o aparecimento de rugosidades no produto.
- ✓ Centralizar e fixar o produto com fita adesiva tipo Micropore, na face no paciente, de acordo com o olho operado.
- ✓ Substitua o oclusor de acordo com as instruções do médico.

Contra indicações

Não apresenta contraindicações, desde que seja usado para fins específicos.

Advertência:

Artigo médico hospitalar – Descartar após o uso.

O produto é destinado aos profissionais da área médico hospitalar, devidamente especializados e formalizados com as técnicas e procedimentos que envolvem o seu uso.

Precauções

- ✓ Recomendado o uso único.
- ✓ Não reutilizar ou reesterilizar.
- ✓ Não utilizar o produto após o vencimento de seu prazo de validade.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Oclusor Ocular Estéril

Revisão 01

- ✓ Não utilizar o produto cuja embalagem apresentar sinais de deterioração ou violação, pois nestes casos a esterilidade não é garantida.
- ✓ Cuidado ao retirar o produto para não prejudicar os tecidos oculares protegidos.
- ✓ As precauções limitam-se às que normalmente estão associadas ao procedimento que está para ser praticado.
- ✓ Uma vez utilizado o produto, o material deverá ser descartado adequadamente de acordo com as normas estabelecidas.

Observação: A Eyeclean não assume qualquer responsabilidade por complicações que possam surgir como resultado da reutilização ou uso impróprio do produto.

Estéril – Esterilizado por Óxido de Etileno

Conservar o produto em temperatura ambiente.

Manter em local ventilado e sem incidência direta de luz solar ou umidade excessiva.

Armazenar em local fresco, seco e limpo, distante de vapores orgânicos e ao abrigo da luz solar.

Lote, fabricação e validade vide cartucho.

Histórico:

Revisão	Motivo	Emissão	Implantação	Revisão
Revisão 00	Emissão inicial	05/08/2021	05/08/2021	08/2023
Revisão 01	Correções ortográficas	01/08/2023	01/08/2023	08/2025

