

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Oclusor Ocular

Revisão 01

Descrição:	Oclusor Ocular Não Estéril Eyeclean
Apresentação:	Embalado em saco plástico, lacrado, múltiplos de 01 (uma) unidade
Registro Anvisa:	81765480002
Classificação de Risco:	I – Baixo Risco
Vencimento do Registro:	Vigente

Modelo	Imagem	Finalidade
Único		Proteção ocular

Teste	Especificação	Referência
Composição	Acrílico	Interna
Comprimento	70 – 110 mm	Interno
Largura	50 – 90 mm	Interno
Esterilidade do Produto	Não estéril	Interna

INSTRUÇÕES DE USO**Apresentação**

OCLUSOR OCULAR NÃO ESTÉRIL EYECLEAN é embalado em saco plástico em polietileno de baixa densidade, lacrado, contendo múltiplos de 01 (uma) unidade.

Composição

Acrílico 100%.

Indicações

O **OCLUSOR OCULAR NÃO ESTÉRIL EYECLEAN** foi projetado especificamente para a proteção do olho operado no pós-cirúrgico.

Instruções de uso

- ✓ Abrir a embalagem cuidadosamente.
- ✓ Retire a quantidade necessária a ser utilizada.
- ✓ Para melhor adesão, limpe e seque previamente a pele ao redor do olho.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Oclusor Ocular

Revisão 01

- ✓ O paciente deverá fechar os olhos mantendo os músculos faciais relaxados, a fim de evitar o aparecimento de rugosidades no produto.
- ✓ Centralizar e fixar o produto com fita adesiva tipo Micropore, na face no paciente, de acordo com o olho operado.
- ✓ Substitua o oclusor de acordo com as instruções do médico.

Contra indicações

Não apresenta contraindicações, desde que seja usado para fins específicos.

Advertência:

Artigo médico hospitalar – Descartar após o uso.

O produto é destinado aos profissionais da área médico hospitalar, devidamente especializados e formalizados com as técnicas e procedimentos que envolvem o seu uso.

Precauções

- ✓ Recomendado o uso único.
- ✓ Não reutilizar.
- ✓ Não utilizar o produto após o vencimento de seu prazo de validade.
- ✓ Cuidado ao retirar o produto para não prejudicar os tecidos oculares protegidos.
- ✓ As precauções limitam-se às que normalmente estão associadas ao procedimento que está para ser praticado.
- ✓ Uma vez utilizado o produto, o material deverá ser descartado adequadamente de acordo com as normas estabelecidas.

Observação: A Eyeclean não assume qualquer responsabilidade por complicações que possam surgir como resultado da reutilização ou uso impróprio do produto.

Não Estéril

Conservar o produto em temperatura ambiente.

Manter em local ventilado e sem incidência direta de luz solar ou umidade excessiva.

Armazenar em local fresco, seco e limpo, distante de vapores orgânicos e ao abrigo da luz solar.

Lote, fabricação e validade vide embalagem.

Histórico:

Revisão	Motivo	Emissão	Implantação	Revisão
Revisão 00	Emissão inicial	05/08/2021	05/08/2021	08/2023
Revisão 01	Correções ortográficas	01/08/2023	01/08/2023	08/2025

